

Инструкция по применению

1. Герметизация зубов.

Очистите профессиональной пастой и протравите в течение 5 секунд с помощью EnaEtch. Промойте и высушите струёй сухого воздуха.

Брашем или небольшим спонжем нанесите тонкий слой EnaSeal на поверхность зуба. Фотополимеризуйте нанесённую смолу, освещая всю поверхность полимеризационной лампой в течение 20 секунд.

2. Герметизация старых композитных реставраций.

Создайте шероховатую поверхность композита бором или интраоральным пескоструйным аппаратом. Промойте и высушите струей сухого воздуха. Брашем или небольшим спонжем нанесите тонкий слой EnaSeal на поверхность композита и раздуйте его воздухом. Фотополимеризуйте нанесённую смолу, освещая всю поверхность полимеризационной лампой в течение 20 секунд.

3. Герметизация новых композитных реставраций

После окончания реставрацию очистите спиртом. Брашем или небольшим спонжем нанесите тонкий слой EnaSeal на поверхность композита и раздуйте его воздухом. Фотополимеризуйте нанесённую смолу, освещая всю поверхность полимеризационной лампой в течение 40 секунд. Отполируйте с помощью системы Enamel plus SHINY .

4. Герметизация временных акриловых протемасс.

Брашем или небольшим спонжем нанесите на поверхность тонкий слой EnaSeal и раздуйте его воздухом. Фотополимеризуйте нанесённую смолу, освещая всю поверхность полимеризационной лампой в течение 20 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при протравливании:

Очень важно, чтобы перед протравливанием ни эмаль, ни дентин не были загрязнены, так как протравливание нужно будет повторить. Избегайте контакта протравочного геля EnaEtch с мягкими тканями полости рта, глазами и кожей. В случае случайного контакта немедленно промойте большим количеством воды.

Хранение:

Срок годности - 3 года, при температуре не превышающей 25 ° C.

Дополнительные замечания :

Не храните адгезив вблизи продуктов, содержащих эвгенол, не допускайте контакта адгезива с материалами, содержащими эвгенол. Эвгенол может ухудшить отверждающие свойства адгезива и вызвать изменение цвета. Избегайте контакта EnaSeal с кожей, особенно тем лицам, которые имеют аллергию на смолу. Используйте в помещениях с температурой 20 ° -25 ° C.

Только для профессионального использования.