

---

**ENAHЕAT (ЕНАХІТ)**  
пристрій для нагрівання шприців-унідоз

Номер за каталогом: СНС3

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>РОЗДІЛ 1</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ</b>                 | <b>3</b>  |
| 1.1 ВІТАЄМО З ПРИДБАННЯМ                   | 3         |
| 1.2 ОПИС ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ         | 3         |
| 1.3 СЛОВНИК                                | 3         |
| 1.4 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ            | 4         |
| 1.5 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ                  | 6         |
| <b>РОЗДІЛ 2</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ</b>    | <b>7</b>  |
| 2.1 ВСТУП                                  | 7         |
| 2.2 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРИСТРОЮ                | 7         |
| 2.3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                | 7         |
| <b>РОЗДІЛ 3</b>                            | <b>8</b>  |
| <b>ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</b>           | <b>8</b>  |
| 3.1 ПРИЗНАЧЕННЯ                            | 8         |
| 3.2 ЕРГОНОМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ                   | 8         |
| 3.3 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ                       | 9         |
| <b>РОЗДІЛ 4</b>                            | <b>11</b> |
| <b>ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ</b> | <b>11</b> |
| 4.1 ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ                | 11        |
| 4.2 ГАРАНТІЯ                               | 11        |
| 4.3 ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА                     | 12        |
| 4.4 УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ                    | 13        |

## ІНДЕКС ФОТОГРАФІЙ

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Рис. 1: ENAHEAT (ENAXIT) (деталь переднього виду) | 8 |
| Рис. 2: ENAHEAT (ENAXIT) (деталь заднього виду)   | 9 |



### Уповноважений представник та імпортер в Україні:

Фізична особа – підприємець Фецич Людмила Тарасівна

Адреса: вул. Горської, будинок 3, кв. 9, м. Львів, Львівська область, 79018, Україна

Тел.: (067) 674 36 26

E-mail: lmartin@ukr.net

## РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

### 1.1 ВІТАЄМО З ПРИДБАННЯМ

Вітаємо з вибором цього продукту.

Ви придбали продукт, який був виготовлений з найвищою точністю, перевірений і випробуваний з ретельною майстерністю.

З 1980-х років компанія Micerium S.p.A. (Міцеріум С.п.А.) випускає інноваційні продукти та отримує престижні нагороди в стоматологічній галузі.

Компанія Micerium S.p.A. (Міцеріум С.п.А.), щоб підтвердити своє постійне прагнення задовольняти вимоги своїх клієнтів, з 1998 року застосовує найповнішу систему якості, яка забезпечує належне управління якістю на всіх етапах: від проектування до розробки, виробництва, установки та обслуговування.

Ми хочемо подякувати Вам за вибір нашої продукції і впевнені, що ця нова покупка стане ефективною підтримкою у Вашій роботі.

### 1.2 ОПИС ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

НАЗВА:  
МОДЕЛЬ

**ЕНАНЕАТ (ENAXIT) пристрій для нагрівання шприців-унідоз  
CHC3**

Номер за каталогом: CHC3 з адаптером EC

Номер за каталогом: CHC3-GB з адаптером UK

Номер за каталогом CHC3-US з адаптером US

ВИРОБНИК:

**MICERIUM S.p.A (МІЦЕРІУМ С.п.А.)**

**Via G. Marconi 83 (Bia Ж. Марконі, 83)**

**16036 Avegno (GE) – Italy (16036 Авеньо (ГЕ) - Італія)**

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до відділів продажів компанії Micerium (Міцеріум) за наступними контактними даними:

- Телефон: (+39) 0185 78 87 880 (наші відділи продажів працюють у всі робочі дні);
- Електронна пошта: [hfo@micerium.it](mailto:hfo@micerium.it)

### 1.3 СЛОВНИК

У цій інструкції використовуються такі символи та їхні відповідні значення:



**УВАГА**

Символ «УВАГА» звертає увагу на процедуру експлуатації, практику або інший подібний захід, який, якщо його не дотримуватися або не виконувати належним чином, може **серйозно пошкодити функціональність та безпеку виробу**.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Символ попередження звертає увагу на процедуру експлуатації, практику або інший подібний захід, який, якщо його не дотримуватися або не виконувати належним чином, може **СПРИЧИНИТИ ТРАВМУВАННЯ**.

## 1.4 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій можна безпечно використовувати лише після прочитання та розуміння інструкції з експлуатації, вказівок з безпеки, всієї додаткової літератури та суворого дотримання наведених вказівок. Пристрій повинен використовуватися тільки за призначенням.

Недотримання всіх інструкцій, наведених в обох документах, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

### ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ!

#### КОРИСТУВАЧ:

1. Цей пристрій призначений виключно для професійного використання.
2. Пристрій повинен використовуватися тільки одним навченим користувачем. Інструменти небезпечні в руках ненавчених користувачів.
3. Перед використанням пристрою уважно та повністю прочитайте інструкцію з експлуатації. Ознайомтеся з принципом роботи, сферами застосування та потенційними небезпеками, пов'язаними з пристроєм.

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ENAHEAT (ENAXIT) пристрій для нагрівання шприців-унідоз дозволяє підтримувати композитні матеріали в ідеальній температурі під час їх застосування в стоматологічному кабінеті та лабораторії. Він також може використовуватися для нагрівання гіпохлориту та анестетиків. Будь-яке інше використання заборонено.

#### БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ:

1. Не використовуйте електричний пристрій у вологих приміщеннях або на відкритому повітрі.
2. Утримуйте робочу зону в чистоті та добре освітлену. Захаращені верстаки та темні зони сприяють виникненню нещасних випадків.
3. Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електричні пристрої створюють іскри, які можуть запалити пил або випари.
4. Тримайте дітей та відвідувачів подалі від робочої зони. Всім цим особам заборонено перебувати в робочій зоні. Вони не розуміють жодних інструкцій, тому можуть отримати серйозні травми. Крім того, відволікання уваги може призвести до втрати контролю.
5. Не дозволяйте відвідувачам торкатися пристрою або подовжувача. Такі запобіжні заходи зменшують ризик травмування.
6. Небезпечна зона - Зона радіусом не менше 0,5 м навколо пристрою повинна бути оголошена небезпечною зоною, оскільки це зона, в якій персонал виконує всі роботи.

#### ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА:

1. Уникайте контакту з заземленими предметами, такими як труби, радіатори, холодильники.
2. Не використовуйте перехідники.
3. Не піддавайте електроприлади впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
4. Не зловживайте шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення обладнання або витягування вилки з розетки. Тримайте шнур подалі від джерел тепла, мастила, гострих країв або рухомих частин.
5. Негайно замініть адаптер ACDC, якщо шнур зношений або пошкоджений. Пошкоджені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

6. Підключіть пристрій до джерела змінного струму, яке відповідає технічним характеристикам блоку живлення. Неправильне напруга живлення може призвести до ураження електричним струмом або опіків
7. Використовуйте тільки адаптер ACDC, що входить до комплекту поставки. Використання інших типів адаптерів може призвести до серйозного пошкодження пристрою та короткого замикання в електричній системі.
8. Аварійна ситуація — вимкніть пристрій за допомогою головного вимикача та витягніть вилку з розетки.

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

1. Не вставляйте в пристрій металеві предмети або рідини.
2. Не використовуйте пристрій, якщо вимикач не вмикає або не вимикає його. Будь-яке обладнання, яке не можна контролювати за допомогою вимикача, є небезпечним і потребує ремонту.
3. Перед тим, як проводити будь-які регулювання або зберігати пристрій, від'єднайте вилку від джерела живлення. Такі запобіжні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску пристрою.
4. Завжди перевіряйте, чи пристрій не пошкоджений. Перед використанням пристрою уважно перевірте його ефективність і справність пристроїв безпеки, а також, за необхідності, пошкоджені деталі. Пристрої безпеки або пошкоджені деталі повинні бути відремонтовані або замінені в авторизованому сервісному центрі, якщо не вказано інше. Багато нещасних випадків трапляються через неналежне обслуговування інструментів.
5. Якщо пристрій впав, не використовуйте його і відправте до авторизованого сервісного центру для проведення відповідних функціональних випробувань.
6. Заміна інструментів повинна здійснюватися кваліфікованими фахівцями – Цей електричний пристрій відповідає чинним правилам безпеки. Ремонт електричних пристроїв повинен здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами.
7. Періодично перевіряйте пристрій, штепсельну вилку та шнур і замінійте адаптер ACDC, якщо вони пошкоджені.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Обслуговування пристрою повинно виконуватися тільки кваліфікованим ремонтним персоналом, уповноваженим компанією Micerium S.p.A. (Міцеріум С.п.А.)  
Обслуговування або технічне обслуговування, що виконується некваліфікованим ремонтним персоналом, заборонено і може призвести до травмування.
2. Під час обслуговування пристрою використовуйте тільки ідентичні запасні частини. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Технічне обслуговування» інструкції з експлуатації. Використання несертифікованих деталей або недотримання інструкцій з технічного обслуговування може створити ризик ураження електричним струмом або травмування.

## ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Конструкція виготовлена з алюмінію та пластику. Для очищення та дезінфекції рекомендується відключити адаптер ACDC і злегка протерти поверхню тканиною, змоченою спиртом (не використовуйте ацетон або інші агресивні засоби для пластику). При необхідності повністю висушіть сухим рушником, включаючи шприц та слоти для наконечників.



### УВАГА

Не занурюйте жодні елементи в рідини та не заливайте рідини в шприц і слоти для наконечників.

Не автоклавуєте.

Ніколи не розпилюйте дезінфікуючий або чистячий засіб безпосередньо на систему.

**Для отримання додаткових інструкцій з безпеки прочитайте всю інформацію про загальну експлуатацію пристрою, що додається до комплекту поставки.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

**Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з безпеки на пристрої!  
Перед використанням цього пристрою ознайомтеся з розташуванням і функціями всіх елементів управління.**

## 1.5 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ця інструкція містить вказівки щодо рекомендованого використання пристрою та його технічного обслуговування. Увесь персонал, відповідальний за ці дії, повинен прочитати та ознайомитися з цією інформацією. Цю інструкцію слід вважати невід'ємною частиною пристрою та **«зберігати для подальшого використання»**.

Якщо цю інструкцію пошкоджено або загублено, зверніться до відділу продажів компанії Micerium (Міцеріум), щоб отримати заміну.

Micerium S.p.A. (Міцеріум С.п.А.) залишає за собою право оновлювати пристрій та інструкції без зобов'язання оновлювати попередні версії, за винятком випадків, коли в інструкції внесені істотні зміни. Однак користувач може звернутися до відділу продажів компанії Micerium (Міцеріум) із запитом про надання оновленої версії інструкції, і після її отримання попередня версія повинна бути знищена.

Якщо у вас є питання, на які немає відповіді в інструкції, зверніться безпосередньо до компанії за допомогою. Якщо ви вирішите продати цей пристрій, надайте новому власнику контактну інформацію компанії Micerium (Міцеріум), щоб йому могли надати допомогу та провести навчання.

Якщо ця контактна інформація НЕ буде надана новому власнику, виробник звільняється від усієї відповідальності, пов'язаної з неправильним використанням пристрою, та від усієї іншої інформації щодо пристрою, що міститься в цій інструкції.

## РОЗДІЛ 2

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

#### 2.1 ВСТУП

Використання пристрою для нагрівання шприців-унідоз ENAHEAT (ENAXIT) CHC3 дозволено тільки добре навченим операторам.

Пристрій повинен бути підключений до електричної мережі (напруга 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 500 мА) за допомогою адаптера ACDC 12 В постійного струму, 1000 мА, 12 Вт, клас II (арт. CHC3 з адаптером ЕС, арт. CHC3-GB з адаптером UK, арт. CHC3-US з адаптером US).



#### УВАГА

**Використовуйте тільки адаптер ACDC, що входить до комплекту:**  
Модель: ВУХ2-1201500 Вхід: 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,5 А Макс. вихід: 12 В 1,5 А

#### 2.2 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРИСТРОЮ

ЕНАHEAT (ENAXIT) пристрій для нагрівання шприців-унідоз CHC3 складається з циліндричного корпусу з виїмками двох різних розмірів для розміщення шприців, флаконів і наконечників, а також електронного блоку управління з вимикачем, світлодіодним індикатором, перемикачем температури і блоком живлення.

#### 2.3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Потужність</b>                                                           | Напруга: 12 В постійного струму, стабілізована<br>Струм: 1 А<br>Потужність: 12 Вт                                                                                   |
| <b>Робоча температура</b>                                                   | Ткім > -20°C                                                                                                                                                        |
| <b>Вибір температур</b>                                                     | T1: +39 °C +/-1%<br>T2: +55 °C +/-1%                                                                                                                                |
| <b>Час нагрівання</b><br>при +20°C (68°F) Ткім.                             | T1: +39 °C 16 хв.<br>T2: +55 °C ~ 55 хв.<br>T1 ⇒ T2 ~ 30 хв                                                                                                         |
| <b>Сигнали</b>                                                              | Світлодіод увімкнено: зелений: увімкнено<br>Світлодіоди T1 і T2: мигають жовтим: нагрівання<br>фіксований жовтий: температура досягнута<br>червоний: сигнал тривоги |
| <b>Умови спрацювання сигналу тривоги</b><br>(Світлодіод світиться червоним) | a. T > +60 °C<br>b. T < -20 °C<br>c. несправність датчика температури або перерва<br>d. підвищення температури нижче 1°C /200 сек.                                  |
| <b>Активні засоби захисту</b>                                               | Програмні засоби захисту                                                                                                                                            |
| <b>Пасивні засоби захисту</b>                                               | 2А швидкодіючий запобіжник на підключенні живлення. 86°C термозапобіжник                                                                                            |
| <b>Розміри (мм)</b>                                                         | 115x110x125 (висота, ширина, глибина)                                                                                                                               |
| <b>Вага (г)</b>                                                             | 750 (з блоком живлення)                                                                                                                                             |

## РОЗДІЛ 3

### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ

#### 3.1 ПРИЗНАЧЕННЯ

ЕНАHEAT (ENAXIT) пристрій для нагрівання шприців-унідоз СНС3 призначений для підтримання композитних матеріалів (шприців і наконечників) в ідеальній температурі для їх застосування в стоматологічному кабінеті та лабораторії. Перша температура (T1: 39 °C) ідеально підходить для нагрівання композиту для нарощування та нагрівання анестетиків і гіпохлориту; друга температура (T2: 55 °C) — для нагрівання композиту для фіксації.



#### УВАГА

Нагрівач шприців можна використовувати тільки з композитами, які підходять для температур 39°C / 55°C, такими як Enamel plus HFO і HRI (Ena HRI/HFO для США) і Tender Pink (крім Flow, OBN та інших кольорів Tender). Інформацію про інші композити дивіться в інструкціях виробника. Переконайтеся, що шприци/наконечники щільно закриті.

Для нагрівання гіпохлориту використовуйте тільки герметичні шприци або закриті флакони, щоб уникнути потрапляння рідини в порожнини пристрою.



#### УВАГА

Всі види використання, відмінні від описаних, заборонені. Не використовуйте пристрій з будь-якими іншими матеріалами, які не вказані для цього пристрою.

#### 3.2 КОНТРОЛЬ

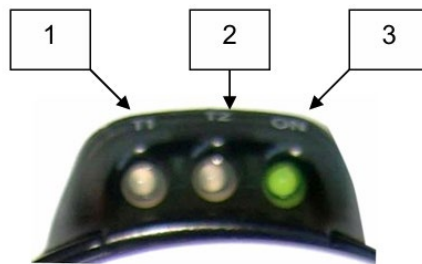


Рис.1 ENAHEAT (ENAXIT) пристрій (деталь переднього виду)

1. Світлодіод T1 для температури 39 °C (мигає жовтим = нагрівання; світиться жовтим: температура досягнута; червоним: сигнал тривоги)
2. Світлодіод T2 для температури 55 °C (мигає жовтим = нагрівання; світиться жовтим: температура досягнута; червоним: сигнал тривоги)
3. Світлодіод ON для увімкнення управління (зелений: увімкнено)

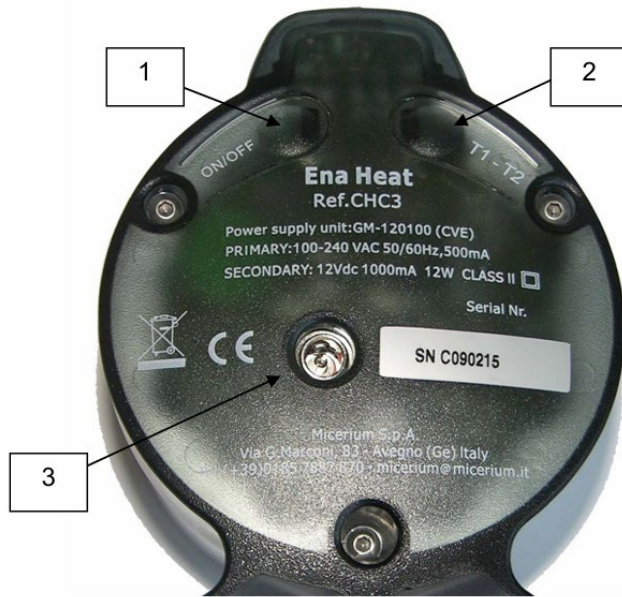


Рис.3 ENAHEAT (ENAXIT) пристрій (деталь заднього виду)

1. Вимикач
2. Перемикач температури T1/T2
3. Блок живлення

### 3.3 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

1. Підключіть адаптер ACDC до пристрою та підключіть його до електричної розетки 110-240 В.
2. Увімкніть вимикач (загориться зелений світлодіод). Коли пристрій працює і світлодіод горить, поверхня пристрою повинна незабаром почати нагріватися. Це ознака того, що пристрій працює.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо пристрій увімкнений, але світлодіод не світиться, перевірте правильність підключення блоку живлення та розетки. Якщо проблема не зникне, зверніться до виробника.

3. Регулюйте температуру за допомогою селектора температури: 55 °C для процедур цементування та 39 °C для нарощування та нагрівання анестетиків і гіпохлориту. Вибір температури буде підкреслено ввімкненням миготливого жовтого світлодіода. Перед використанням зачекайте необхідний час для досягнення ідеальної температури: після досягнення заданої температури світлодіод стане постійним.



#### УВАГА

T1: (відповідає 39 °C)

Для нагрівання композиту для нарощування, для нагрівання анестетиків та гіпохлориту.

T2: (відповідає 55 °C)

Для нагрівання композиту для фіксації



**УВАГА**

У таблиці в пункті 2.3 наведено середній час нагрівання при кімнатній температурі 20 °С.  
Нижча кімнатна температура збільшить цей час.

4. Вставте шприци, флакони або наконечники в отвори принаймні за 10 хвилин до використання матеріалу (20 хвилин для фіксації).
5. Після завершення реставрації вийміть шприци або наконечники з пристрою. Пристрій може залишатися увімкненим навіть протягом усього дня. Якщо ви працюєте при температурі 55 °С, вставляйте тільки шприци та наконечники потрібного кольору.

## РОЗДІЛ 4

### ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ

#### 4.1 ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Управління всіма функціями, як функціональними, так і безпековими, здійснюється мікроконтролером, який чітко контролює правильність виконання операцій нагрівання та підтримки температури. Під час нагрівання контролюється нахил температурної кривої, щоб переконатися, що приріст становить не менше 1°C кожні 200 секунд. Якщо ця умова не виконується або переривається, спрацьовує сигнал тривоги (червоний світлодіод) і відбувається вимкнення пристрою (програмний захист). Щоб усунути стан тривоги (перезапустити), необхідно вимкнути і знову увімкнути пристрій за допомогою кнопки ввімкнення/вимкнення.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо проблема повторюється, поверніть пристрій до сервісного центру.

Ви можете отримати повідомлення про тривогу (захист програмного забезпечення) навіть у таких випадках:

- a) перевищення температури +60 °C
- b) нижче -20 °C
- c) у разі несправності системи контролю температури



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У випадках a) або b) необхідно відправити пристрій до сервісного центру.

Крім того, були введені наступні та інші види пасивних засобів безпеки, які не залежать від будь-яких функцій управління електронікою:

- a) неперезаряджуваний запобіжник 2A на джерелі живлення як захист від перевантаження або короткого замикання всередині. Злиття компонента робить пристрій непридатним для використання.
- b) Термозапобіжник, відкалібрований на +86 °C, що контактує з нагрівальною камерою для захисту від перегріву, спричиненого втратою регулювання електроніки. Цей компонент плавиться при досягненні заданої температури, запобігаючи роботі пристрою.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

В обох випадках необхідно відправити пристрій до сервісного центру.

#### 4.2 ГАРАНТІЯ

На пристрій надається 12-місячна гарантія на матеріали та конструкцію.

Цей пристрій розроблено та виготовлено з урахуванням усіх правил безпеки. Якщо протягом гарантійного терміну у пристрої будуть виявлені виробничі дефекти або невідповідності, виробник усуне їх відповідно до наших стандартів. Для будь-якої гарантійної претензії необхідно надати рахунок-фактуру або накладну як доказ. Гарантія обмежується заміною деталі або деталей, у яких виявлено виробничий дефект або невідповідність.

**Гарантія не поширюється на:** витрати на персонал, витрати технічного персоналу, транспортні витрати, упаковку тощо. Крім того, гарантія не поширюється на помилки або інші проблеми, за які виробник не несе відповідальності, а також на деталі, що підлягають нормальному зносу.

З цієї гарантії не можуть впливати прямі або непрямі претензії щодо відшкодування збитків будь-яким особам або речам, навіть якщо причина збитків може бути пов'язана з пристроєм. Ця гарантія автоматично втрачає

чинність, якщо пристрій ремонтується, змінюється або відкривається силоміць користувачем/покупцем або будь-якою сторонньою особою, яка не має на це права.

У разі виникнення будь-яких проблем протягом гарантійного терміну користувач/покупець повинен звернутися до виробника або до авторизованого сервісного центру, зазначеного виробником.

Право на обмін всього пристрою на новий виключається. Будь-які деталі, замінені протягом гарантійного терміну, повинні бути повернуті компанії Micerium S.p.A. (Міцеріум С.п.А.), яка надасть нову деталь. Якщо замінені деталь не буде повернута, вона буде виставлена в рахунок користувачеві/покупцеві.

## 4.3 ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Звертайтеся до компанії Micerium S.p.A. (Міцеріум С.п.А.) за наступними контактними даними:

- Номер телефону: (+39) 0185 78 87 880 (наші відділи продажів працюють усі робочі дні);
- Електронна пошта: [hfo@micerium.it](mailto:hfo@micerium.it)

та Уповноваженого представника в Україні: «Фізична особа – підприємець Фецич Людмила Тарасівна» за наступними контактними даними:

- Номер телефону: +38 (067) 674 36 26
- Електронна пошта: [lmartin@ukr.net](mailto:lmartin@ukr.net)

#### 4.4 СИМВОЛИ НА ПРИСТРОЇ ТА/АБО НА УПАКОВЦІ - УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

ДИВ. ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ



СЕРІЙНИЙ НОМЕР

Перші чотири цифри: рік виробництва



УТИЛІЗАЦІЯ УПАКОВКИ

Картонна коробка (гофрований картон)



УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ  
РЕГЛАМЕНТАМ



##### **Інформація для користувачів**

Цей продукт підпадає під дію Європейської директиви 2012/19/ЄС про зменшення використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та утилізацію відходів.

Символ перекресленого контейнера, зазначений на вашому обладнанні або його упаковці, вказує на те, що продукт, термін експлуатації якого закінчився, повинен бути утилізований окремо від інших відходів. Окремий збір цього обладнання, термін експлуатації якого закінчився, організовується та управляється виробником. Якщо ви хочете позбутися цього обладнання, зверніться до виробника та дотримуйтесь системи, яку він обрав для окремого збору обладнання, термін експлуатації якого закінчився.

Правильний окремий збір для подальшої передачі використаного обладнання на переробку, обробку та екологічно безпечну утилізацію допомагає уникнути можливого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я і сприяє повторному використанню та/або переробці матеріалів, з яких складається обладнання. Незаконна утилізація продукту власником передбачає застосування адміністративних санкцій, передбачених законом.



**MICERIUM S.p.A. (МІЦЕРІУМ С.п.А.)**

Via G. Marconi 83 16036  
(Bia Ж. Марконі, 83, 16036)  
Avegno (GE) – Italy (Авеньо (ГЕ), Італія)  
Тел. (+39) 0185 7887 880  
E-mail: [hfo@micerium.it](mailto:hfo@micerium.it)  
[www.micerium.com](http://www.micerium.com)